

اختبار حمل سهل الاستخدام

- دقة تتخطى 99% ابتداءً من يوم بداية الدورة الشهرية المتوقعة.
- يرجى قراءة النشرة بعناية قبل إجراء الاختبار.



1 إجراء الاختبار

يمكنك إجراء الاختبار في أي وقت من اليوم ابتداءً من يوم بداية دورتك الشهرية المتوقعة.

- عندما تكونين جاهزة لإجراء الاختبار، أخرجي عصا الاختبار من الغلاف المعدني الرقيق وانزعي الغطاء الأزرق. استخدمي عصا الاختبار على الفور.

وضع الاختبار في مجرى البول

يمكنك إجراء الاختبار مباشرة بوضعه في مجرى البول، أو في عينة من البول يتم جمعها في وعاء نظيف وجاف.

- أمسكي الطرف متغير اللون متجهًا لأسفل في مجرى البول، أو في عينة البول المجمعة، كما هو مبين لمدة **5 دقائق فقط**.
- يتحول طرف تغير اللون على الفور إلى اللون البرتقالي مشيرًا إلى أنه جارٍ امتصاص البول. يجب الاستمرار في وضع الطرف متغير اللون في البول طوال الثواني الخمس كاملة.
- حافظي على بقاء طرف تغير الألوان متجهًا لأسفل أو ضعي عصا الاختبار بشكل مسطح حتى ظهور الخط في نافذة التحكم.
- يمكنك إعادة تركيب الغطاء في مكانه.

راجعي السؤال رقم 5 إذا لم يتحول طرف تغير اللون إلى اللون البرتقالي بالكامل.



3 قراءة نتيجة الاختبار

يمكنك الآن قراءة نتيجة الاختبار في نافذة النتائج.



2 انتظري لمدة دقيقتين


- يدل الخط الأزرق في نافذة التحكم على نجاح الاختبار.
- يمكنك قراءة النتيجة بعد دقيقتين.
- لا تقربي نتيجة اختبارك حتى يظهر هذا الخط الأزرق.
- إذا لم يظهر خط أزرق في نافذة التحكم خلال **10 دقائق**، فإن الاختبار لم ينجح (راجعي السؤال رقم 6).



ليس من المهم أن يكون أحد الخطين اللذين يشكلان الرمز "+" أفقى أو أعرض من الآخر؛ فالنتيجة تشير إلى حدوث حمل:



إذا لم تكوني متأكدة من النتيجة بعد، فراجعي السؤال رقم 7 لمعرفة التفاصيل كاملة.

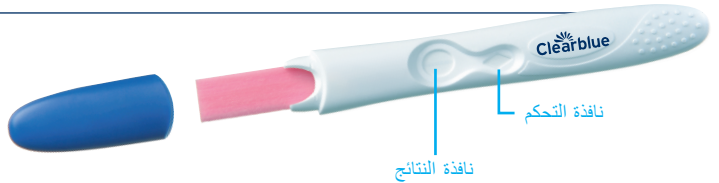

مهم! يرجى قراءة النتيجة خلال **2 إلى 10 دقائق** من إجراء الاختبار. ويتم تجاهل أي تغييرات في النتيجة بعد هذا الوقت.

6 استخدمت اختبار الحمل ولكن لم يظهر أي خط أزرق في نافذة التحكم. ماذا ينبغي أن أفعل؟

عند عدم ظهور أي خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، فإن الاختبار لم ينجح. وقد يرجع ذلك إلى:
عدم الإبقاء على طرف تغير اللون في الاتجاه للأسفل أو عدم وضع عصا الاختبار على سطح مستو بعد وضعها في البول.
استخدام كمية كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا من البول. يتعين عليك جمع عينة لمدة 5 ثوان.

ينبغي إجراء الاختبار مجددًا باستخدام اختبار جديد مع العناية باتباع التعليمات. قد ترغبين في جمع عينة من بولك في وعاء نظيف وجاف وتغيرين طرف تغير اللون فقط لمدة 5 ثوان.

7 ماذا يحدث إذا ما كنت غير متأكد من النتيجة؟
• للتحكم من أن نتيجة اختبارك "إيجابية"، يجب أن يكون هناك خط أزرق في نافذة التحكم ورمز "4" في نافذة النتائج خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار.
وقد يختلف شكل الرمز "4" في نافذة النتائج، ولكن يتعين أن يكون الخطان اللذان يشكلان الرمز "4" والخط في نافذة التحكم ذوي عرض مشابه (انظري الصور من أ إلى ج).

الصورة أ
يُرخ حدث هذا الأمر عندما تكونين حاملًا وتجريين الاختبار بعد مرور أكثر من أيام قليلة بعد الدورة الشهرية المتوقعة حيث تكون مستويات هرمون hCG مرتفعة.

الصورة ب
هذا طبيعي عندما تكونين حاملًا وتجريين الاختبار في اليوم المقرر لنزول الطمث أو في يوم قريب منه نظرًا لأن مستويات hCG لا تزال منخفضة نسبيًا.

الصورة ج
لا تزال النتيجة تشير إلى "حدث حمل".
إذا كنت لا تزالين غير متأكد من نتيجتك، فينبغي لك الانتظار 3 أيام على الأقل قبل إجراء الاختبار مرة أخرى، مع مراعاة اتباع التعليمات.
• للتحكم من أن نتيجة اختبارك هي "غير حامل"، يجب أن يوجد خط أزرق في نافذة التحكم ورمز "4" في نافذة النتائج خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار. إذا كانت نتيجة الاختبار "غير حامل"، ولكل ما زلت متشككة في حدوث حمل، فراجعي السؤال 10.

8 ماذا يحدث إذا ما كنت غير متأكد من النتيجة؟
يمكن قراءة النتيجة في أي وقت من 3 إلى 10 دقائق بعد إجراء الاختبار. يجب تجاهل أي تغير في النتيجة بعد 10 دقائق.

9 تشير نتيجة اختبائي إلى أنني "حامل". ماذا ينبغي أن أفعل؟
إذا أشار الاختبار أنك حامل، فيُعتبر عليك زيارة الطبيب حيث سيقدّم لك إرشادات بخصوص الخطوات اللاحقة.

10 تشير نتيجة اختبائي إلى أنني "غير حامل". ماذا ينبغي أن أفعل؟
قد لا تكونين حاملًا أو قد لا يكون مستوى هرمون الحمل مرتفعًا بما يكفي لاكتشافه أو قد تكونين أحطأت في حساب يوم الدورة الشهرية المتوقعة. إذا تأخرت دورتك الشهرية، فيمكنك إجراء الاختبار خلال 3 أيام إذا كنت لا تزالين تشكين في حدوث حمل. إذا كانت نتيجة اختبارك للحمل "سلبية"، ولم تأتي الدورة الشهرية، فينبغي استشارة الطبيب.

1 ما مدى دقة Clearblue؟
يحق هذا الاختبار دقة تتجاوز 99% في الاختبارات العملية، عند استخدامه بدءًا من يوم بداية الدورة الشهرية المتوقعة.

2 كيف يعمل Clearblue؟
عندما تكونين حاملًا، يفرز جسمك هرمون الحمل hCG (موجبة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية)، ويزيد مقدار هرمون hCG في جسمك في قتراب الحمل الأولي. يستطیع هذا الاختبار اكتشاف الكمية الصغيرة من هذا الهرمون في البول بدايةً من يوم الدورة الشهرية المتوقعة (تبلغ حساسية هذا الاختبار 25 مليون وحدة دولية/ملي لتر).

3 متى يمكنني إجراء الاختبار باستخدام Clearblue سهل الاستخدام؟
يمكنك إجراء الاختبار في أي وقت من اليوم ابتداءً من يوم بدء دورتك الشهرية المتوقعة. لحساب اليوم المتوقع للدورة الشهرية، احسبي مدة الدورة الشهرية العادية بحساب عدد الأيام بدءًا من اليوم الأول لنزول الدورة حتى اليوم السابق لبداية الدورة التالية.
• إذا كنت تميزين بدورات غير منتظمة، فلا بد أن تعطي وقتًا بمقدار أطول دورة لك في الأشهر الأخيرة قبل إجراء الاختبار.

• لا تشربي كمية كبيرة من السوائل قبل إجراء الاختبار.
• إذا أشارت النتيجة إلى عدم حدوث حمل، ولكل ما زلت متشككة في حدوث حمل، فراجعي السؤال 10.

4 هل يمكن أن تؤثر أي أدوية أو ظروف صحية في النتيجة؟
أقري دائمًا تعليمات الجهة المصنعة لأي دواء تتناولينه قبل إجراء الاختبار.
• يمكن أن تؤدي عقاقير الخصوبة التي تحتوي على هرمون موجبة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية إلى نتائج مضللة (تؤخذ عقاقير الخصوبة عادةً بالحقن، وقد يؤدي إجراء الاختبار بعد وقت قصير جدًا من تناولها إلى إعاقة نتيجة "إيجابية" زائفة).

• لا تؤثر الأدوية الخصوية الأخرى (مثل الكلواميفين سترات) والمسكات وعقاقير منع الحمل الهرمونية (مثل أقراص منع الحمل) في النتيجة.
• إذا كنت قد توقفت مؤخرًا عن استخدام عقار هرموني مانع للحمل أو كنت تستخدمين أدوية الخصوبة مثل الكلواميفين سترات، فقد تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة؛ مما يؤدي إلى إجراء الاختبار في وقت مبكر جدًا.
• إذا كنت حاملًا مؤخرًا (ولو لم يسلم الحمل لمدة كاملة)، فقد تحصلين على نتيجة "حامل" زائفة.

• يمكن أن يعطي الحمل خارج الرحم وتكيس المبايض وبلوغ سن انقطاع الطمث وبعض الحالات المرضية النادرة الأخرى نتائج مضللة.
• إذا ظهرت لك النتيجة "حامل"، فمن المحتمل أن تكونين لاحقًا أنك لست حاملًا بسبب حدوث فقدان طبيعي للحمل والذي يمكن أن يحدث في المراحل الأولى للحمل.

إذا حصلت على نتائج غير متوقعة، فيُعتبر عليك مناقشتها مع الطبيب.

5 استخدمت اختبار الحمل ولكن لم يتحول طرف تغير الألوان إلى اللون القزويني بالكامل. ماذا ينبغي أن أفعل؟

عند عدم تحول الطرف المتغير اللون إلى اللون القزويني بالكامل، فقد يكون السبب عدم استخدام كمية كافية من البول. ومع ذلك، عند ظهور الخط الأزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، عندها يكون الاختبار قد نجح. إذا لم يظهر خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، فراجعي السؤال 6.

www.clearblue.com

للاستفسار عن المنتج، الرجاء الاتصال بدعم العملاء على العنوان التالي:-

حامل ترخيص التسويق:

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy

جنيف، سويسرا.

موقع التصنيع:

Abbott Diagnostics (Shanghai) Co. Ltd.

شنغهاي، الصين.

Clearblue علامة تجارية لشركة SPD.

حقوق الطبع والتأليف © شركة SPD لعام 2023. جميع الحقوق محفوظة.

لمعرفة الخطوات اللاحقة ومعلومات وإرشادات عامة بخصوص أمور الحمل، الرجاء زيارة موقعنا على الإنترنت: www.clearblue.com

	الجهة المصنعة		تخطر إعادة الاستخدام
	كود الدفعة		جهاز طبي للتشخيص في المختبر
	يُستخدم قبل تاريخ		الحد المسموح به لدرجة الحرارة درجتان مئويتان إلى 30 درجة مئوية



0123

اختبار ذاتي للاستخدام المنزلي.
للاستخدام الشخصي في المختبر فقط.
غير مخصص للاستخدام الداخلي.
يجوز إعادة الاستخدام.
يستخدم مرة واحدة فقط.
حافظي على الاختبار بعيدًا عن متناول الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة بين درجتين إلى 30 درجة مئوية.

يسمح بالوصول إلى درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة قبل إجراء الاختبار حال حفظه في الثلجة.

لا تستخدميه إذا كان الغلاف المعدني الرقيق الحافظ تالفًا.

لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ "الصلاحية". يتم التخلص منه مع المخلفات المنزلية العادية.